

2021

GPHANTOM REIN

**INSTRUCTIONS
D'UTILISATION**


Gphantom



Merci d'avoir choisi Gphantom!

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le développement de solutions pour l'entraînement médical. Si vous souhaitez un modèle spécifique pour votre formation, veuillez nous contacter. Ici, nous vous aiderons à manier et à optimiser la durabilité de votre produit.

Votre Gphantom Rein est éligible au Programme de Fidélité Gphantom.

Consultez les conditions.



À PROPOS DU PRODUIT

I. Nous indiquons l'utilisation d'aiguilles d'une épaisseur égale ou inférieure à 21G. Tout au long de l'entraînement, selon l'exécution des procédures, des marques d'aiguille pourraient rester dans votre Gphantom jusqu'à 2 jours maximum. Pour une meilleure utilisation de cette technologie de récupération des matériaux, laissez votre produit dans un endroit frais, à l'abri du soleil, pendant 48 heures après l'utilisation;

II. Nous recommandons des mouvements jusqu'à 30 degrés par rapport à la surface du produit, en utilisant d'aiguilles telles que celles mentionnées dans l'item précédent. Évitez les mouvements très longs (grand angulation) après l'insertion d'aiguille, car ils pourront raccourcir la durée de vie de votre modèle;

III. Le Gphantom Rein est indiqué pour l'entraînement à l'utilisation des ultrasons pour la ponction rénale dans les néphrostomies et les néphrolithotripsies percutanées, avec le patient en décubitus ventral et en position dorsale. Il s'agit d'un modèle réaliste qui simule les angles rénaux à l'intérieur de l'abdomen et le système collecteur avec du liquide à l'intérieur, permettant un entraînement parfait avant utilisation in vivo.



MANIPULATION ET CONSERVATION

I. Rangez toujours votre produit dans son emballage et dans un endroit frais, à l'abri du soleil. Pour une meilleur de sécurité dans le stockage des produits, rangez le produit en position de décubitus ventral à l'intérieur de l'emballage.

Remarque: Exposer votre Gphantom à des températures supérieures à 30 °C, pendant de longues périodes, peut provoquer des déformations et la perte de propriétés;

II. Pour l'entraînement, retirez seulement le couvercle de l'emballage en le gardant dans son socle d'origine;

III. Après l'entraînement, nettoyez le Gphantom Rein avec du papier absorbant, en enlevant l'excès de gel à ultrason et, ensuite, rincez-le sous l'eau courante sans le retirer du socle.

Remarque: Ne gardez pas le Gphantom avec un excès de gel, car cela pourrait causer une mauvaise odeur, réduisant ainsi, la durabilité du produit;

N'utilisez pas de détergents ou d'éponges, car ils endommagent le produit!

IV. Après le nettoyage, rangez votre Gphantom selon les instructions contenues dans l'item I;

V. Le Gphantom Rein est un produit à finalité didactique, destiné, UNIQUEMENT, à la formation médicale. En cas de doute, veuillez nous contacter via nos canaux de communication.



SPÉCIFICATIONS

Code produit PBD050508

Poids approximatif (sans emballage) 4,2 kg

Longueur 28,5 cm

Hauteur 23 cm

Largeur 30 cm



Gphantom

SPÉCIFICATIONS



Code produit PBD050508

Poids approximatif (sans emballage) 4,2 kg

Longueur 28,5 cm

Hauteur 23 cm

Largeur 30 cm



Images échographiques mode B du Gphantom Rein^[1].



[1] Les images peuvent contenir des modifications mineures.



Gphantom

**Pour toute doute ou demande,
veuillez nous contacter.**



+55 16 98848-2468



contato@gphantom.com.br